

# Manual de Usuário

# Colchões

# Antiescaras

TM400 / TM425 / TM450 / TM526



# TheraMart

1. INTRODUÇÃO .....	3
2. INFORMAÇÕES DE CONTATO .....	3
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO .....	3
4. INDICAÇÃO DE USO .....	3
5. ESPECIFICAÇÕES .....	4
6. MODO DE USO .....	5
7. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO .....	6
8. DESCARTE .....	6
9. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE .....	6
10. ADVERTÊNCIAS .....	7
11. PRECAUÇÕES .....	7
12. CONTRAINDICAÇÕES .....	7
13. EFEITOS ADVERSOS .....	7
14. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....	7



## 1. INTRODUÇÃO

- Este guia do usuário contém informações essenciais sobre os Colchões Antiescaras Theramart. Ele inclui detalhes sobre o produto, sugestões de quando e como usá-lo, especificações técnicas, orientações de uso, dicas de limpeza, e muito mais. Por favor, dedique um momento para ler cuidadosamente e compreender todas as instruções antes de começar a desfrutar do seu produto.

## 2. INFORMAÇÕES DE CONTATO:

Endereço: Rua Brusque, 1078, Terreo Box 02,  
Centro, CEP: 88.302-001, Itajaí-SC  
CNPJ: 45.784.439/0001-90

Responsável Técnico: Priscila de Gouveia Zamboni Lins CRF-SC 20958  
Registro Anvisa N.: 82692690001

## 3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Nossos Colchões Antiescaras Theramart são cuidadosamente confeccionados com a espuma viscoelástica 'Memory Foam'. Isso significa que eles foram projetados para tornar a experiência mais confortável para o paciente, ajudando a redistribuir a pressão, minimizar a fricção na pele e se ajustar de maneira personalizada ao corpo. Independentemente da posição, a espuma se molda suavemente, distribuindo o peso de forma equilibrada. Esses colchões desempenham um papel importante na prevenção e tratamento de úlceras de pressão, garantindo o bem-estar do paciente.

## 4. INDICAÇÃO DE USO

- Nossos Colchões Antiescaras Theramart são destinados a pacientes em ambientes hospitalares gerais ou de atendimento domiciliar (HomeCare) e têm como objetivo principal prevenir e tratar úlceras de pressão. Eles foram projetados para melhorar o conforto do paciente, ao mesmo tempo em que promovem a redistribuição uniforme da pressão.
- Recomenda-se que a implementação desses colchões seja feita em conjunto com a avaliação clínica de fatores de risco e análises da pele realizadas por um profissional de saúde. Isso garantirá o uso mais adequado e eficaz do produto, adaptado às necessidades específicas do paciente

## 5. ESPECIFICAÇÕES

- Modelos: TM400, TM425, TM450, TM526
- Fabricados com espuma viscoelástica 'Memory Foam' e espuma de alta densidade "HD Foam"
- Capa de colchão uniforme e lisa para facilitar transferência e posicionamento
- Projetados para proteger áreas críticas de pressão: cabeça, sacral e calcâneo
- Peso máximo suportado pelos colchões: 226 kg

Modelo e Nome do Produto	Dimensão	Material do Colchão	Material da Capa	Densidade
TM400 Colchão Antiescaras Therafoam	200 x 90 x 15 cm	Espuma de memória (viscoelástica) + Espuma de Alta Densidade	Dupla camada de poliéster	Camada superior: Espuma de memória Viscoelástica - 45D Camada inferior: Espuma de Alta Densidade - 26D
TM425 Colchão Antiescaras Multifoam	200 x 90 x 15 cm	Espuma de memória (viscoelástica) + Espuma de Alta Densidade	100% Poliéster	Camada superior: Espuma de memória Viscoelástica - Região Calcâneo 45D Camada Superior - Espuma de memória Viscoelástica - Região Sacral e Cabeça 26D + Lateral de espuma de alta densidade 26D Camada inferior: Espuma de Alta Densidade - 26D
TM450 Colchão Antiescaras Therazona	200 x 90 x 15 cm	Espuma de memória (viscoelástica) + Espuma de Alta Densidade	Poliéster + Funda de PVC	Única camada de espuma de Alta Densidade - 26D
TM526 Colchão Antiescaras Theradays	200 x 90 x 15 cm	Espuma de memória (viscoelástica) + Espuma de Alta Densidade	Poliéster + Funda de PVC	Camada superior: Espuma de memória Viscoelástica - Região Calcâneo 45D Camada Superior - Espuma de memória Viscoelástica - Região Sacral e Cabeça 26D Camada Inferior: Espuma de Alta Densidade - 26D

## 6. MODO DE USO

Para começar a usar seu novo colchão, remova cuidadosamente toda a embalagem. (Não use facas, tesouras ou qualquer objeto pontiagudo para abrir o produto pois pode danificar acidentalmente o colchão).

O colchão começará a voltar ao seu tamanho normal imediatamente e estará totalmente utilizável dentro de 30 a 90 minutos. Ele continuará a se descomprimir e a se firmar nas próximas 24 a 48 horas.

Para prolongar a vida útil do colchão, recomendamos que ele seja girado a cada 3 ou 4 meses. O colchão deve ser depositado sobre a cama escolhida, e posteriormente coberto com lençol, devidamente limpo, antes de se posicionar o paciente.

Como qualquer produto de mobiliário, o colchão deverá estar perfeitamente instalado na cama, para evitar quaisquer transtornos ao paciente e ao profissional médico.

1. Certifique-se de que as grades laterais da cama funcionam corretamente.
2. Certifique-se de que a estrutura da cama é aplicável para uso com o colchão.
3. Posicione o colchão de modo que o nome Theramart fique virado para cima e na extremidade dos pés da cama.
4. Coloque o colchão na cama.
5. Forre o colchão com lençóis, se for o caso.
6. Coloque o paciente em posição no colchão:
  - a. Certifique-se de que os calcanhares do paciente estejam na direção da extremidade dos pés do colchão.
  - b. Verifique se o paciente está centralizado no colchão, com o corpo alinhado corretamente. Se a cama tiver o mecanismo de pé retrátil, ajuste a seção dos calcanhares adequada para a altura do paciente.

### **PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, RECOMENDA-SE:**

Durante o uso:

Colocar a cama e, conseqüentemente, o colchão em ambiente ventilado e fresco, proporcionando bem-estar ao paciente, e maior vida útil do produto.

Evitar o derramamento de líquidos e produtos corrosivos líquidos no colchão, para evitar sua deterioração.

Antes de posicionar o paciente, certifique-se de que há um lençol cobrindo a superfície do colchão que entrará em contato com o paciente.

## 7. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO:

### LIMPEZA:

- Os componentes internos não podem ser lavados.
- Não mergulhe o colchão em soluções de limpeza ou desinfecção. Não deixe acumular líquidos.
- Ao limpar a parte debaixo do colchão, não deixe nenhum líquido infiltrar na área do zíper; líquidos em contato com o zíper podem vazar para dentro do colchão.

### OBSERVAÇÕES:

1. Limpe toda a superfície usando um pano limpo e úmido e uma solução de água com sabão neutro.
2. Seque completamente.

### DESINFECÇÃO:

- Alguns desinfetantes são corrosivos por natureza e podem causar danos ao produto, caso sejam usados de forma incorreta. Use apenas os "Desinfetantes sugeridos" descritos abaixo, de acordo com as instruções do fabricante.
- É necessário secar completamente antes de armazenar ou colocar lençol. Não remover o excesso, pode causar degradação do material da proteção.
- Não seguir esses procedimentos pode anular a garantia do produto.

### DESINFETANTES SUGERIDOS:

1. Produtos de limpeza quaternários
2. Produtos de limpeza fenólicos
3. Solução de alvejante clorada (alvejante a 5,25% diluído em 1 parte de alvejante para 100 partes de água)
4. Álcool isopropílico a 70%

### OBSERVAÇÕES:

1. Aplique o desinfetante de acordo com as recomendações do fabricante para concentração e tempo de contato.
2. Evite o excesso de saturação e certifique-se de que o produto não fique úmido por mais tempo do que o recomendado pelo fabricante do produto.

## 8. DESCARTE:

Siga as regulamentações locais para reciclagem ou eliminação adequada do produto no final de sua vida útil.

## 9. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazene e transporte em temperatura ambiente, evitando umidade e luz solar direta. Mantenha o produto na embalagem original até o uso.

## 10. ADVERTÊNCIAS:

- Examine sempre a pele do doente com regularidade. Consulte um médico caso ocorra eritema ou úlceras cutâneas.
- Inspeccione sempre a existência de objetos estranhos entre o colchão e a estrutura da cama.
- Não utilize o colchão numa estrutura de cama maior ou menor, que não se adeque à largura, comprimento ou espessura. Isto serve para evitar o risco do deslizamento ou interferência com partes móveis da cama.
- Não utilize o colchão como um dispositivo de transferência.
- Não utilize, eleve ou mova o colchão com o paciente em cima.
- Não exceda a carga de trabalho segura.

## 11. PRECAUÇÕES

Esteja sempre atento aos dispositivos ou equipamentos que são colocados em cima do colchão. Pois, podem ocorrer danos na superfície devido ao peso do equipamento, ao calor gerado pelo equipamento ou a bordas cortantes do equipamento.

**Não coloque sobre colchões ou acessórios no interior da cobertura para evitar o risco de reduzir o desempenho da redistribuição da pressão.**

Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções de uso que acompanham o produto.

**12. CONTRAINDICAÇÕES.** Não se aplicam.

**13. EFEITOS ADVERSOS.** Não se aplicam.

## 14. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de dúvidas, problemas ou reclamações relacionadas aos Colchões Antiescaras Theramart, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone +55 11 99022-9381 ou pelo e-mail [parceiro@theramart.com.br](mailto:parceiro@theramart.com.br).

## 15. TERMOS E CONDIÇÕES

Para informações detalhadas sobre garantia, devoluções, trocas e outros termos e condições, consulte o documento de Termos de Uso e Garantia disponível no site da Theramart.

