

Manual de Usuário

Colchões


Caixa de Ovo

TM435 / TM436 / TM500



TheraMart

1. INTRODUÇÃO	3
2. INFORMAÇÕES DE CONTATO	3
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	3
4. INDICAÇÃO DE USO	3
5. ESPECIFICAÇÕES	4
6. MODO DE USO	4
7. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	4
8. DESCARTE	5
9. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	6
10. ADVERTÊNCIAS	6
11. PRECAUÇÕES	6
12. CONTRAINDICAÇÕES	6
13. EFEITOS ADVERSOS	6
14. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	6
15. TERMOS E CONDIÇÕES	6

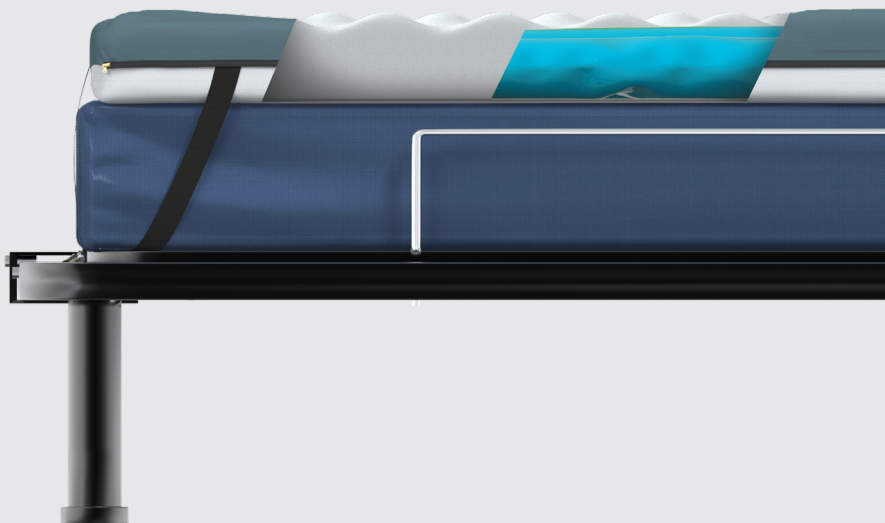

1. INTRODUÇÃO

Este manual de usuário fornece informações importantes sobre os Colchões Caixa de Ovo Theramart, incluindo descrição do produto, indicações de uso, especificações, instruções de uso, limpeza, armazenamento e muito mais. Certifique-se de ler e compreender todas as instruções antes de utilizar o produto.

2. INFORMAÇÕES DE CONTATO:

Importado e Distribuído por: Theramart Brasil Ltda
Endereço: Rua Brusque, 1078, Terreo Box 02,
Bairro: Centro, CEP: 88.302-001, Itajaí-SC
CNPJ: 45.784.439/0001-90

Responsável Técnico: Priscila de Gouveia Zamboni Lins CRF-SC 20958

Registro Anvisa N.: 82692690002

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Colchões caixa de ovo Theramart são fabricados em espuma flexível de poliuretano com perfil desenhado, tipo caixa de ovo, que apresentam uma superfície com relevos semelhantes a essa forma geométrica. Essa combinação de material e design oferece várias funções benéficas para o conforto e a saúde dos usuários.

Os colchões de espuma Caixa de Ovo se adapta perfeitamente aos contornos do corpo para um suporte personalizado, desempenha um papel crucial na distribuição de pressão, alívio de pressão e conforto dos usuários, contribuindo para um ambiente de repouso mais saudável e confortável.

4. INDICAÇÃO DE USO

Os Colchões Caixa de Ovo Theramart são indicados para pacientes que ficam deitados por longo período. Seu formato proporciona alívio a pressão do tecido das partes do corpo que ficam apoiadas ao colchão, evitando o aparecimento de escaras e ulcerações causadas pela pressão.

5. ESPECIFICAÇÕES

- Modelos: TM435, TM436, TM500
- Projetados para proteger áreas críticas de pressão: cabeça, sacral e calcâneo
- Peso máximo suportado pelos colchões: 150 kg

Nome do Produto Modelo	Dimensões	Materiais Colchão	Materiais Capa	Densidade
TM435 Colchão Caixa de Ovo - Therawave	183 x 83 x 10 cm	Espuma Flexível de Poliuretano	Sem capa	26D
TM436 Colchão Caixa de Ovo - Therawave Gel	183 x 83 x 10 cm	Espuma Flexível de Poliuretano + Gel	Sem capa	30D
TM500 Colchão Caixa de Ovo - Therawave Gel	193 x 86 x 9 cm	Espuma Flexível de Poliuretano + 5 pacotes de gel no interior	Nylon + Fundo de PVC	22D

6. MODO DE USO

Para começar a usar seu novo colchão, remova cuidadosamente toda a embalagem. (Não use facas ou tesouras, pois elas podem danificar acidentalmente o colchão).

O colchão começará a voltar ao seu tamanho normal imediatamente e estará totalmente utilizável dentro de 30 a 90 minutos. Ele continuará a se descomprimir e a se firmar nas próximas 24 horas.

Para prolongar a vida útil do colchão, recomendamos que ele seja girado a cada 3 ou 4 meses.

Coloque o colchão de espuma caixa de ovo com a parte lisa sobre o seu colchão, posteriormente deve ser coberto com lençol, devidamente limpo.

7. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

LIMPEZA:

- Os componentes internos não podem ser lavados.
- Não mergulhe o colchão em soluções de limpeza ou desinfecção. Não deixe acumular líquidos.

1. Limpe toda a superfície usando um pano limpo e úmido e uma solução de água com sabão neutro.
2. Seque completamente.

Para melhor conservação do produto recomenda-se ao lavar:

- Não use produtos alvejantes (cloro);
- Usar uma escova de cerdas macias;
- Não lavar em máquinas de lavar roupas ou tanques elétricos;
- Secar a sombra;
- Não torcer.

DESINFECÇÃO:

- Alguns desinfetantes são corrosivos por natureza e podem causar danos ao produto, caso sejam usados de forma incorreta. Use apenas os "Desinfetantes sugeridos" descritos abaixo, de acordo com as instruções do fabricante.
- É necessário secar completamente a proteção da superfície antes de armazenar ou colocar lençol.
- Não seguir esses procedimentos pode anular a garantia do produto.

1. Prepare a Solução Desinfetante:

- Prepare uma solução desinfetante diluída com água e um desinfetante suave, como o álcool isopropílico. Siga as instruções do desinfetante quanto à diluição correta.

2. Aplicação da Solução:

- Aplique a solução desinfetante com um borrifador ou um pano limpo e macio. Certifique-se de não encharcar o colchão, pois o excesso de umidade pode danificar a espuma.

3. Esponja ou Pano Limpo:

- Use uma esponja ou pano limpo para espalhar a solução desinfetante de maneira uniforme sobre a superfície. Certifique-se de cobrir toda a área.

Aplique desinfetante de acordo com as recomendações do fabricante para concentração e tempo de contato.

Evite o excesso de saturação e certifique-se de que o produto não fique úmido por mais tempo do que o recomendado pelo fabricante do produto.

8. DESCARTE

Siga as regulamentações locais para reciclagem ou eliminação adequada do produto no final de sua vida útil.

9. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazene e transporte em temperatura ambiente, evitando umidade e luz solar direta. Mantenha o produto na embalagem original até o uso.

10. ADVERTÊNCIAS

Examinar o produto antes de utilizá-lo.

11. PRECAUÇÕES

Esteja sempre atento aos dispositivos ou equipamentos que são colocados em cima do colchão. Poderão ocorrer danos na superfície devido ao peso do equipamento, ao calor gerado pelo equipamento ou a bordas cortantes do equipamento.

- Não coloque sobrecolchões ou acessórios no interior da cobertura para evitar o risco de reduzir o desempenho da redistribuição da pressão.

Antes de utilizar o produto, ler atentamente as instruções de uso que acompanham o mesmo.

12. CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplica.

13. EFEITOS ADVERSOS

Não se aplica.

14. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de dúvidas, problemas ou reclamações relacionados aos Colchões Antiescaras Theramart, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone +55 11 99022-9381 ou pelo e-mail parceiro@theramart.com.br.

15. TERMOS E CONDIÇÕES

Para informações detalhadas sobre garantia, devoluções, trocas e outros termos e condições, consulte o documento de Termos de Uso e Garantia disponível no site da Theramart.

